



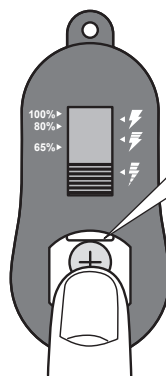
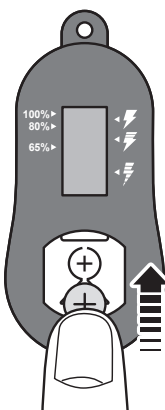
シーメンス バッテリーチェッカーの使い方

1 平らな面(+面)を上向きにして、電池を測定板に置きます。

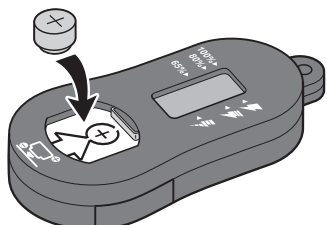

 空気電池のシールは剥がしてお使いください。


2 測定板の矢印表示に従い、指で電池を滑らせます。




この端子に電池側面を押し当てます。

測定は1秒以内にしてください。
1秒以上の測定は電池の消耗が進み正しく計れません。


3 電池残量が液晶画面に表示されます。

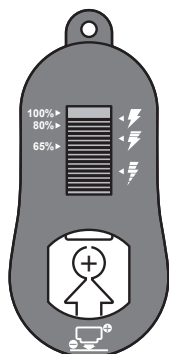

80%~100%付近
電池の状態は良好です。

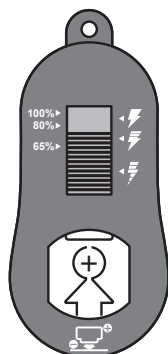

65%~80%付近
電池が弱くなってきています。
予備の電池を用意することをおすすめします。

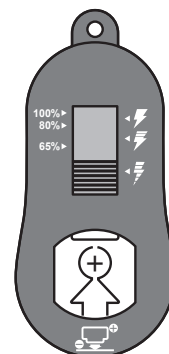

65%未満
電池の交換をおすすめします。



※液晶表示は正面からまっすぐに見てください。(傾けて見ると誤差が大きくなります)

※表示値はあくまでも目安です。

※残量表示中も電池は消耗します。測定は1秒以内になしてください。

測定板の下には電池を2個保管できる収納ケースがついています。

(電池シールの形状などにより、収納できないものもあります。)

