

# signia

Life sounds brilliant.

## easyTek boost 取扱説明書

Hearing  
Systems

**SIEMENS**

このたびは easyTek boost をお買い求め  
頂き、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいた  
だき、正しくご使用ください。

また、この取扱説明書は保証書と一緒に大切に保  
管してください。

※この取扱説明書の内容は2017年4月のものです。製品の仕様、付属品、外  
観などは予告なく変更される場合があります。

※本文中のイラストは、実際の製品と異なる場合がございます。

# 目次

■ 安全上のご注意	4ページ
■ easyTek boostのご紹介	10ページ
■ 付属品の確認	11ページ
■ 各部の名称	12ページ
■ ご使用の前に	13ページ
■ 補聴器とのペアリング	16ページ
■ 基本操作	18ページ
■ 外部機器の接続	21ページ
■ easyTekアプリ	34ページ
■ 故障かな?と思われたときは	36ページ
■ 操作ボタン早見表	38ページ
■ LED点灯表示早見表	40ページ
■ 保管と輸送について	42ページ
■ アフターサービスについて	43ページ

## 安全上のご注意(必ずお守りください。)

お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生ずる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明します。



**警告：**

この表示がある項目は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



**注意：**

この表示がある項目は、「傷害を負う可能性または物的損傷のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



**禁止：**

この表示がある項目はしてはいけない「禁止」の内容です。

- より快適なご使用のための方法を説明しています。



よりよくリモコンを使用するためのアドバイスとヒントです。

## 警告

- 心臓ペースメーカーを使用している方は、easyTek boostを使用しないでください。
- 破損したeasyTek boostをそのまま使用しないでください。感電する危険があります。破損した場合は、購入した販売店にご相談ください。
- easyTek boostは、測定装置や電子機器に干渉する恐れがあります。
  - 病院や飛行機では電源をお切りください。
  - その他、通信機器の使用を制限している場所では、その指示に従ってください。
- ネックループが首に巻きつくと窒息の危険を伴います。
  - ネックループが、機械の可動部に巻き込まれた場合や突起物に引っかかったり、扉に挟まれたりすると大変危険です。周囲のものに十分注意してください。
  - 同梱のネックループをご使用ください。
  - 12歳以下の子供は安全のためにeasyTek boostをご使用にならないでください。
- 補聴器やリモコンは飲み込める小さい部品を含んでいます。これらを飲み込むと窒息の危険を伴います。
  - 小さな子供やペットが触れるところに置かないでください。
  - 小さな子供やお年寄りが使う場合は、誤って飲み込まないよう、周囲の人が常に注意してください。
  - 誤って飲み込んだときはあわてず、医師、救急医療センターなどに相談してください。

## 警告

- 外部出力機器を接続する場合は、電気安全法やIEC60065規格などの安全性を備えた機器を接続してください。安全性が確保されていない機器を接続すると感電する危険があります。
- easyTek boostの改造は、怪我や故障の原因になります。正規の部品、アクセサリをご使用ください。
- 引火性の強い場所や爆発の危険のあるところでは、easyTek boostを使用しないでください。
- 充電する際は、周囲の温度が0°C～45°Cの場所でおこなってください。

## 禁止

- easyTek boostの改造、分解をおこなわないでください。
- 付属の電源アダプタ、USBケーブル以外ご使用にならないでください。
- easyTek boostに強い衝撃を与えたり、ぶついたりしないでください。
- 直射日光の当たる場所やストーブの近くなど高温になるところに置かないでください。
- お風呂やシャワー、雨などに濡らさないでください。また、台所や浴室などの湿度のあるところに置かないでください。
- easyTek boostの汚れを拭き取るときは、アルコールやベンジンを使用しないでください。表面を傷つけます。柔らかい布を使用し軽く拭き取ってください。
- 電磁波の発生するところから離れてください。
- レントゲンやMRIなどの検査は、故障の原因になります。検査室に持ち込まないでください。

## 注意

- easyTek boostは取扱説明書に従い補聴器の調節用にお使いください。
- 取扱いはていねいに。
  - easyTek boostは精密機械です。落としたり、ぶつかけたりしないでください。
  - 汗などが内部に入ると故障する恐れがあります。ご使用の際は汗などが入り込まないように注意してください。また、ご使用後は必ずお手入れをしてください。
  - シンナー、ベンジンなどで拭かないでください。
  - 電子レンジの中に入れてください。
- もし、水中に落としてしまったり、衣服といっしょに洗濯してしまったりしたら……
  - 水中に落としたときは、よく水を切り、陰干して修理に出してください。修理に出すときはその旨を説明してください。
  - 洗濯機に入れたり、海水や汚水に落としたりしたときは、よく水を切り陰干して修理に出してください。修理に出すときはその旨を説明してください。
  - 雨や汗で濡れたときは乾いた布ですぐに拭き取り、陰干しください。
  - 故障の原因が、水による故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので予めご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理になります。
- easyTek boostを電子レンジで乾燥させないでください。



## 注意

- 自動車・オートバイ・自転車を運転中にeasyTek boostの携帯電話通話機能を使用しないでください。交通事故の原因となります。自転車・オートバイ運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用は法律などで罰せられる場合があります。
- 電磁波が発生するところについて
  - easyTek boostは国際規格の電磁両立性に適合するように設計されています。
  - ラジオ・テレビの放送所、タクシー無線の近くや、すぐ近くで電子レンジ・IHクッキングヒーター、超音波洗浄機・超音波センサーなどを使用しているところだと、放送が聞こえたり、雑音が入ったりすることがあります。補聴器の故障ではありません。補聴器をとりはずすか、その場所から離れてください。
- 補聴器のテレコイルモード
  - 補聴器のテレコイルが有効になっているときeasyTek boostを操作するとプツプツという雑音聞こえることがあります。この場合、補聴器からeasyTek boostを10cm以上離して操作してください。
- このeasyTek boostはあなたの補聴器と通信するように設定されています。他の人のリモコンで補聴器の設定が変わってしまう場合は、お買い求めの販売店に相談してください。
- 充電の使用時間は、使用環境や充電の劣化度により異なります。
- easyTek boostの電源が入らないほど充電を消費した状態で保管しないでください。充電の性能や寿命を低下させる原因となります。
- ご不要になったeasyTek boostは自治体指定の方法で処分してください。


## easyTek boostのご紹介

easyTek boostは、easyTek boostに対応している補聴器(以下、補聴器と表記します)のプログラムやボリュームを調節することができます。また、外部入力を切り替えてBluetooth<sup>®</sup>※対応製品と接続し、テレビや音楽を聴いたり電話をしたりすることができます。

### ■補聴器のプログラムや音量を調節するとき



### ■easyTek boostでテレビや音楽を聴いたり、電話をしたりするとき

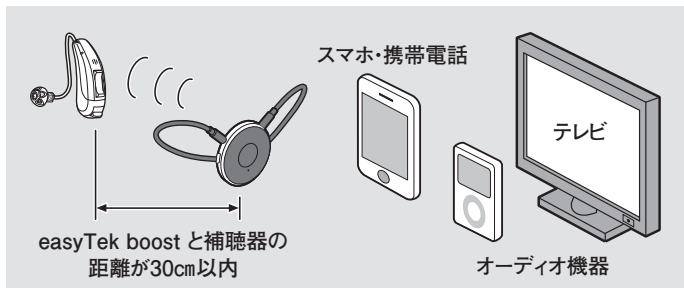


※ BluetoothはBluetooth SGI Incの登録商標または商標です。弊社はライセンスを取得してBluetoothロゴを使用しています。他の商標と商品名は、それぞれ所有者の管理下にあります。

## 付属品の確認

ご使用になる前に、付属品がすべて揃っていることを□に☑を  
いれて確認してください

easyTek boost 本体

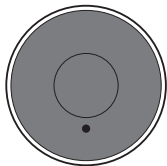


ネックループ【1個】




USBケーブル【1本】



電源アダプタ【1個】

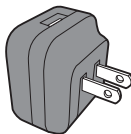


耐水スリーブ 【1個】

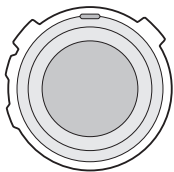

付属品は商品の仕様変更などに  
伴い変更になる場合やイラストと  
異なる場合がございます。

## 各部の名称

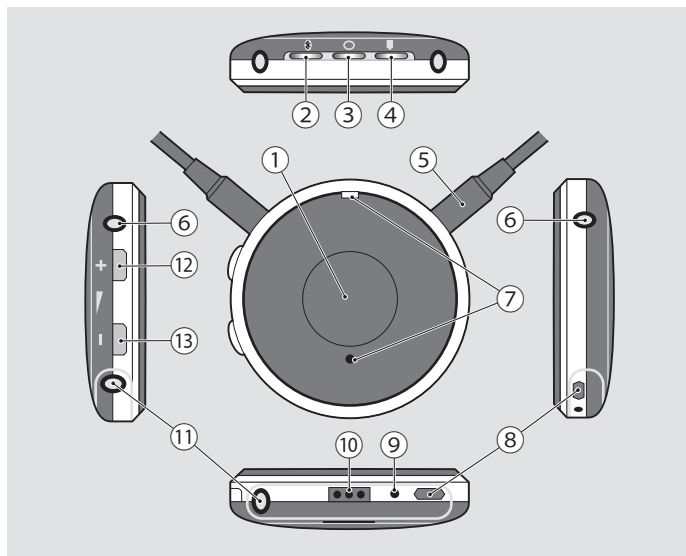

①ファンクションボタン 

②青色 LED

③緑色 LED

④橙色 LED

⑤ネックループ

⑥ネックループソケット


⑦マイク穴

⑧USB ポート

⑨リセットボタン

⑩FM 端子

⑪3.5 mmステレオソケット

⑫ボリュームアップボタン 

⑬ボリュームダウンボタン 

## ご使用の前に



easyTek boostは充電電池を内蔵しています。充電電池を取り出すことはできません。充電電池は予め仮充電をしてから出荷していますが、改めて充電をしてからご使用ください。


### ■充電します

- ① easyTek boostに付属のUSBケーブル(小)を接続します。
- ② USBケーブル(大)を電源アダプタに接続して充電します。

※耐水スリーブをご使用になられている場合は、耐水スリーブを外してください。

### ■充電電池の充電状況

充電中は橙色LEDが点灯します。	
充電が完了すると緑色LEDが点灯します。	

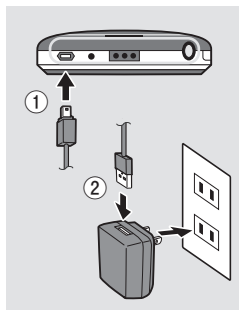


- 充電時間は約2時間です。
- パソコンを利用して充電(約4時間)する場合
  - easyTek boostのスイッチは自動的にオフになります。
  - パソコンの電源はオンにしてください。スリープモードやスタンバイモードにはしないでください。この場合easyTek boostの充電電池を消耗いたします。
- 内蔵の充電電池は消耗品です。使用状態によって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは充電電池の交換時期です。お買い求めの販売店にご相談ください。

## ■ネックループ取付け

easyTek boostをご使用する際は、ネックループを首の周りに掛けてください。(ネックループは補聴器と通信するためのアンテナとして機能します。)


- ①片側のネックループをeasyTek boost本体に差し込みます。
- ②ネックループの反対側を本体に差し込みます。

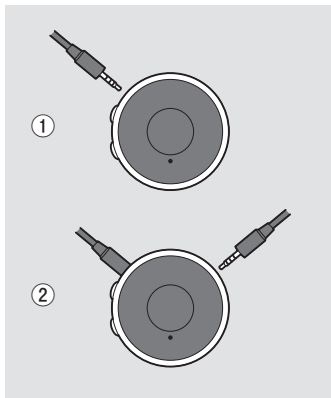

### ⚠ 注意

ネックループはしっかりと差し込んでください。


差し込み方が緩いと補聴器との通信に影響が出たり、easyTek boostが落下して破損したりする場合がございます。

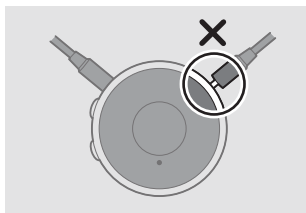

## ■耐水スリーブ

耐水スリーブは、水しぶきなどからeasyTek boostを守ります。

本体に耐水スリーブをかぶせてから、ネックループをしっかり差し込んでください。

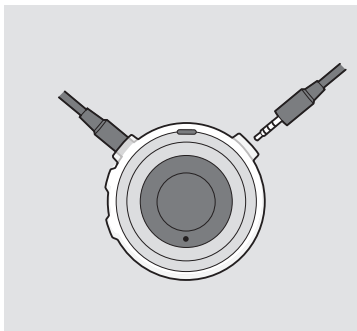








### ⚠ 注意

耐水スリーブは、easyTek boostを防水するものではありません。  
easyTek boostを濡らさないようご注意ください。

## 補聴器とのペアリング

easyTek boostと補聴器は、最初にペアリングする必要があります。  
ペアリングが完了すると次回から、そのまま補聴器を調節できます。  
(万一 easyTek boost を操作しても補聴器が設定どおりに動作しない場合は、この手順に従って再度ペアリングをおこなってください。)

- ① easyTek boost、補聴器とも電源を切った状態にします。  
(easyTek boost：緑色LED消灯、補聴器：電池室を開きます)
- ② easyTek boostを首に掛けてください。
- ③ 補聴器を耳に装用してください。
- ④ easyTek boostのファンクションボタン  を緑色LEDが点灯  するまで長押し(約2秒)してください。  
easyTek boostが起動して、近くの補聴器の検索を始めます。  
(もし青色LEDが点滅したら  を短く1回押します。青が消えて緑だけになります。異常ではありません。)
- ⑤ 緑色LEDが点滅    している間(約10分間)に補聴器の電源を入れてください。両耳の場合、できるだけ間を空けずに2台とも電源を入れてください。  
※片耳が先にペアリングされると、もう片耳がペアリングされません。  
必ず両耳でペアリングしてください。(右記  参照ください)

補聴器の電源が入るとお知らせ音が流れてお知らせします。  
ペアリングには数秒かかります。



⑥ 緑色LEDが点滅後、5秒間点灯して消灯します。



これでペアリングが正常に完了しました。

補聴器からは「ピピッ」とお知らせ音が聞こえます。(補聴器とのペアリングがすぐされた場合、電源が入るときのお知らせ音により、ペアリングのお知らせ音が聞こえないことがあります。)

**i** 片耳がペアリングされた状態で、もう片耳をペアリングする場合は、ペアリングを解除(33ページ参照)してからペアリングをやり直してください。

## 基本操作


easyTek boostは必ず首に掛けてお使いください。




- ① ネックループの片方を外して、ネックループを首の周りにかけます。





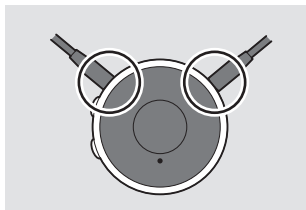


- ② ネックループをeasyTek boost本体にしっかりと差し込みます。







## ■電源操作

easyTek boostの電源が切れている状態でファンクションボタンを緑色LEDが点灯するまで押し続けてください。(約2秒)

①	 2秒間緑色LEDが点灯	easyTek boost起動中。
②	 緑色LEDが点滅	補聴器を検索中。 すぐに接続された場合は、 省略されます。
③	 5秒間緑色LEDが点灯	補聴器と接続完了。
注)	 10秒間橙色LEDが点滅	充電池の残量が不足して、 電源が入らない。

easyTek boostの電源が入っている状態でファンクションボタンを緑色LEDが点灯するまで押し続けてください。(約2秒)


①	 緑色LEDが徐々に 消えていきます。	easyTek boostの電源を 切ります。
---	--	----------------------------

-  ● easyTek boostの電源を入り切りしても補聴器の電源は自動的に入り切りしません。
- easyTek boostは電源が入った後、10分間補聴器を検索します。この間に補聴器が検索されなかった場合、easyTek boostの電源は自動で切れます。
- easyTek boostの電源が入っているか確認するためにはボリュームアップ  またはボリュームダウンボタン  を押し続けてください。緑色LEDが点灯した場合は、easyTek boostの電源が入っています。


## ■音量の調節

補聴器の音量を上げるにはボリュームアップボタン **+** を押します。


補聴器の音量を下げるにはボリュームダウンボタン **-** を押します。

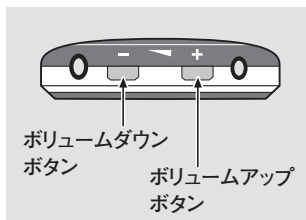

## ■聴こえのプログラム切替え

補聴器のプログラムを変更するにはファンクションボタン  を押します。プログラムは1→2→…→1と順番に切り替わります。


補聴器は電池を入れた直後は常にプログラム1になっています。

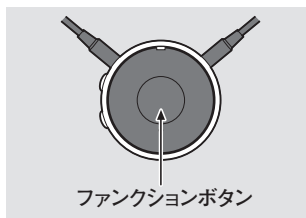


## ■補聴器をミュート(消音)する

補聴器をミュート(スリープモード)にするには、

ボリュームアップボタン **+** と  
ボリュームダウンボタン **-** を同時に2秒間押し続けます。ミュート状態でもう一度、押し続けると音が出ます。補聴器の音量とプログラムは変わりません。

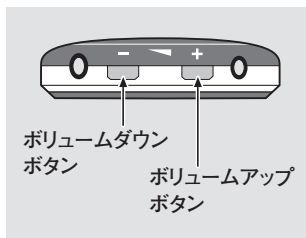


 両耳で補聴器をご使用の場合は、両方の補聴器が調節されます。


## 外部機器との接続

### ■オーディオストリーミング(音声データ転送)

easyTek boostはBluetoothやオーディオケーブルでスマートフォンや音楽プレーヤーなどと接続でき、補聴器にはワイヤレスで音声信号を送信します。

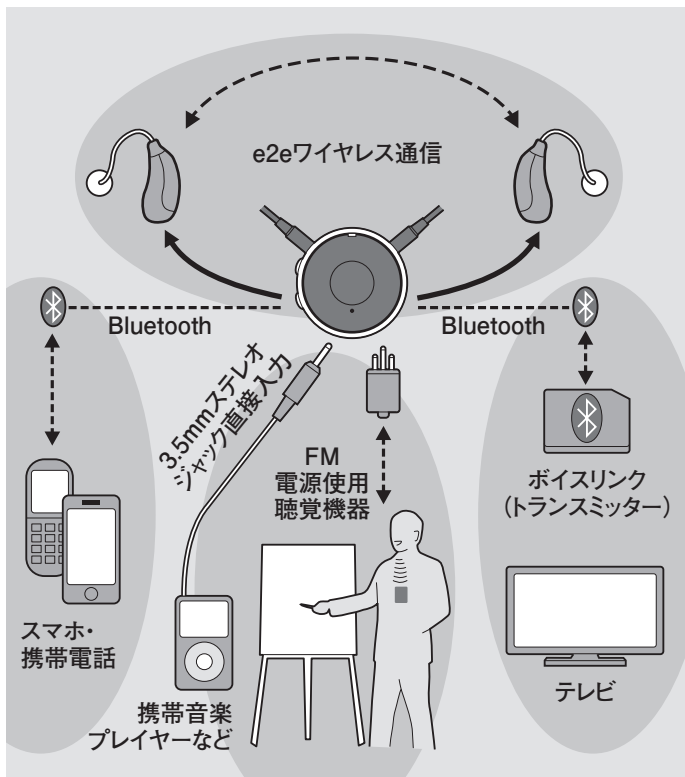


## ■接続可能な機器(別売)

	<p>ボイスリンク(2台まで) テレビやBluetoothに対応していないオーディオ機器を接続してワイヤレスで使用できます。</p>
	<p>Bluetooth対応電話(2台まで)</p>
 MP3	<p>オーディオ機器(MP3) (3.5mmオーディオジャック付)</p>
 FM	<p>FM受信機 ご使用の補聴器にオーディオインプットが無くてもFMシステムを使用できます</p>
<p>上記の機器が有効に接続されている場合は、青色LEDが点灯します。 </p>	

## ■ボイスリンクを使用する

ボイスリンクを使用すれば、会議などでマイクを付けた話し手の声を補聴器に届けます。また、テレビや音楽プレーヤーの音を補聴器に届けることができます。

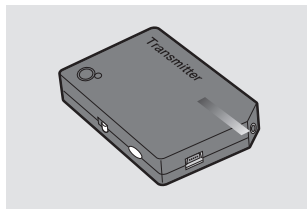

連続使用時間：耳かけ型、RIC型 約6時間  
：耳あな型 約4時間

**i** ボイスリンクと付属のマイクやテレビなどの外部機器との接続方法は、ボイスリンクの取扱説明書をご参照ください。





## ●ボイスリンクのペアリング

easyTek boostと付属のボイスリンクはペアリング済みで出荷しています。ボイスリンクはもう1台（別売）ペアリングできます。easyTek boostの操作距離内でボイスリンクの電源が入っていれば、easyTek boostを操作することによりボイスリンクと接続されます。

- i**
- ボイスリンクの操作方法は、ボイスリンクの取扱説明書も併せてご参照ください。
  - ネックループがしっかりとeasyTek boostに差し込まれていることを確認してください。


● ペアリング手順(付属のボイスリンクはペアリング済みで出荷していますので、この作業は不要です。)


① easyTek boostとボイスリンクの電源を入れてください。  
この作業中は2つを1m以内に近づけて置きます。

② easyTek boostのファンクションボタン  と  
ボリュームアップボタン  と  
ボリュームダウンボタン  を  
青・緑色のLEDが交互に点滅   
するまで同時に長押し(約5秒間)します。

③ easyTek boostが近くのボイスリンクの検索を開始します。

④ ペアリングには数秒～3分程度かかります。

⑤ 青色LEDが点滅後、点灯します。   
これでペアリングが正常に完了しました。  
音声自動的に送信されます。







※ 青色LEDが点滅後、消灯した場合   
ペアリングに失敗しました。この場合、ボイスリンクの電源が入っているか、ボイスリンクが操作範囲に入っているかを確認して、再度実行してください。

(ペアリングが済んだボイスリンクは、再ペアリングできないので同じ表示になります。ペアリング済みかどうかは、次のページのことを試してみます。)



## ● ボイスリンクに接続した機器を聴くには

**i** ボイスリンクの操作方法、マイク/テレビなどの接続の仕方はボイスリンクの取扱説明書をご確認ください。

- ①ボイスリンクの電源を入れます。
- ②ファンクションボタン  を2回押します。
- ③青色LEDが点灯し、数秒でボイスリンクに接続した機器の音が補聴器から聞こえてきます。
- ④ボリュームアップボタン  と  
ボリュームダウンボタン  を同時に押すと補聴器のマイクからの  
入力音が停止して、ボイスリンクから音だけになります。
- ⑤もう一度、ボリュームアップボタン  と  
ボリュームダウンボタン  を同時に押すと補聴器のマイクから  
の入力音とボイスリンクからの音のミックスになります。
- ⑥ボイスリンクとの接続を終了するときにはファンクションボタン  を  
1回押します。
- ⑦補聴器のプログラムは、ボイスリンクと接続する前に使っていたプログラムへ自動的に戻ります。

**i** ● ボイスリンクがeasyTek boostの通信圏内から離れた場合、音声信号は途切れます。  
● 信号が途切れてから5分以内に通信圏内に戻った場合は、自動的に信号の送信を開始します。

## ■Bluetooth対応電話を使用する

Bluetooth対応電話(以下、携帯電話と表記します)があればeasyTek boostをマイク、補聴器をイヤホン代わりにして通話することができます。


### 連続使用時間

- ：耳かけ型、RIC型 約6時間
- ：耳あな型 約4時間



※全ての携帯電話で正常な動作を保証するものではありません。

※特に旧型の携帯電話の場合、正常につながらない場合があります。

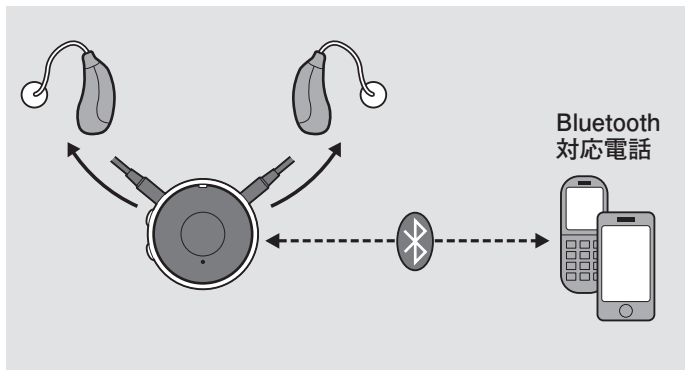






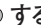

## ● 携帯電話のペアリング

easyTek boostと携帯電話は最初にペアリングする必要があります。ペアリングが完了すると次回から、easyTek boostと携帯電話が操作距離内で電源が入ると自動的に接続されます。



- お使いの携帯電話の取扱説明書も併せてご参照ください。
- ネックループがしっかりとeasyTek boostに差し込まれていることを確認してください。

① easyTek boostと携帯電話の電源を入れてください。

② easyTek boostのファンクションボタン  と  
ボリュームアップボタン  を  
青色LEDが点滅      するまで同時に長押しします。

③ 携帯電話をデバイス検索モードにします。  
詳しくは携帯電話の取扱説明書を参照してください。

④ 携帯電話上に“easyTek”が検出されて表示されます。

⑤ 検出された機器の中から“easyTek”を選択します。  
ペアリングには数秒かかります。

※ 電話機によっては以下（一部または全部）の設定が必要になる場合があります。

- ・PINコード : 「0000」（零を4桁）
- ・Bluetooth機器 : 「ハンズフリー」または「両方鳴動」
- ・優先接続 : 「接続する」

⑥ 青色LEDが点滅後、5秒間点灯して消灯します。




これでペアリングが正常に完了しました。





※青色LEDが点灯後、消灯した場合





ペアリングに失敗しました。この場合、携帯電話の電源が入っているか、携帯電話が操作範囲に入っているかを確認して、再度実行してください。

**i** ペアリングをキャンセルするにはファンクションボタン  を押してください。

● 電話を受けるには

- ①携帯電話に電話がかかってきたとき、補聴器に呼び出し音が鳴り、青色LEDが素早く点滅  します。
  - ②ファンクションボタン  を押して通話を開始します。相手の声は直接補聴器から聞こえます。
  - ③こちらの話し声は、easyTek boostのマイクを通じて相手に伝えることができます。携帯電話を特に操作する必要はありません。
  - ④通話を終了するには、ファンクションボタン  を押すと電話回線が自動的に切れます。携帯電話を操作して切る必要はありません。
  - ⑤通話が終了すると補聴器のプログラムは、電話がかかってくる前に使っていたプログラムへ自動的に戻ります。
- ※通話拒否する場合は、ファンクションボタン  を長押し(2秒以上) 押してください。  
(全ての携帯電話がサポートする機能ではありません)

● 電話をかけるには

- ① 携帯電話でダイヤルします。この時、携帯電話の呼び出し音は補聴器から聞こえません。
- ② 携帯電話をそのままにして、ファンクションボタン  を2回押します。携帯電話の通話がeasyTek boostへ移ります。  
※一部の機種では②の操作をすることなく、通話を自動的にeasyTek boostへ転送する機種もあります。  
※1回しか押さなかったり、2回押すのが早すぎたりすると電話が切れてしまいます。
- ③ こちらの話し声はeasyTek boostのマイクを通じて相手に伝えることができます。携帯電話を特に操作する必要はありません。
- ④ 通話を終了するには、ファンクションボタン  を押すと電話回線が自動的に切れます。携帯電話を操作して切る必要はありません。
- ⑤ 補聴器のプログラムは、電話をかける前に使っていたプログラムへ自動的に戻ります。




- 通話中は、easyTek boostの電源を切ることやスリープモードにすること、プログラムを変更することはできません。
- 電話をeasyTek boostで保留することはできません。保留する場合は、携帯電話を操作してください。
- ペアリングされた2台の電話が鳴った場合、easyTek boostは最初に鳴った電話を受信します。
- easyTek boostを使用している通話中に、もう1台の電話に着信があってもeasyTek boostは受信することができません。もう1台の電話の着信を受けるには、通話中の電話を切ってください。

## ■ ケーブル接続で音楽を聴く





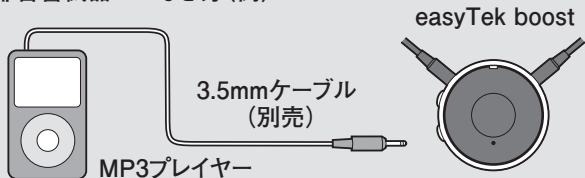

easyTek boostのオーディオ入力(3.5mmステレオソケット)を使用すれば、MP3プレーヤーなどの外部音響機器を直接接続して音楽を聴くことができます。補聴器はワイヤレスヘッドホン代わりにお使いいただけます。

連続使用時間：耳かけ型、RIC型 約10時間  
：耳あな型 約7時間

### 外部音響機器のつなぎ方(例)



### ● 操作方法

- ① ケーブルを接続すると自動的に外部入力設定に切り替わります。  
ケーブルを接続した状態でeasyTek boostの電源を入れた場合は、ファンクションボタン  を押して外部入力設定に切り換えます。
- ② ボリュームアップボタン  とボリュームダウンボタン  を同時に押すと補聴器のマイクからの入力音が停止して、外部音響機器だけの音になります。  
もう一度、ボリュームアップボタン  とボリュームダウンボタン  を同時に押すと補聴器のマイクからの入力音と外部音響機器からの音のミックスになります。
- ③ 外部音響機器との接続を終了するときはファンクションボタン  を押すか、ケーブルを外します。
- ④ 補聴器のプログラムは、ケーブルをつなぐ前に使っていたプログラムへ自動的に戻ります。

## ■FM受信機を使用する


FM受信機(別売)を使用すれば、FM電波使用の聴覚機器と接続することができます。


連続使用時間：耳かけ型、RIC型 約10時間  
：耳あな型 約7時間


**i** FM受信機は、両方の補聴器に同じ音声信号を送信します。  
(モノラルサウンド)

### ● FM受信機のつなぎ方


- ① FM受信機を接続すると自動的に外部入力設定に切り替わります。


FM受信機を接続した状態で easyTek boostの電源を入れた場合は、ファンクションボタン  を押して外部入力設定に切り換えます。

- ② ボリュームアップボタン  と

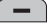
ボリュームダウンボタン  を同時に押すと補聴器のマイクからの入力音が停止して、外部音響機器だけの音になります。

もう一度、ボリュームアップボタン  と

ボリュームダウンボタン  を同時に押すと補聴器のマイクからの入力音と外部音響機器からの音のミックスになります。

- ③ FM受信機との接続を終了するときはファンクションボタン  を押すか、FM受信機を外します。

- ④ 補聴器のプログラムは、FM受信機をつなぐ前に使っていたプログラムへ自動的に戻ります。

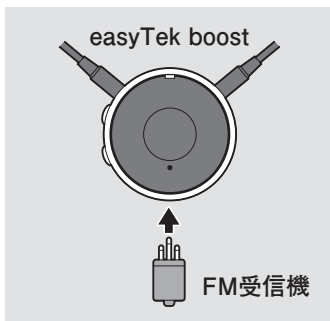

## ■複数の機器を接続した場合

※複数の機器をeasyTek boostに接続した場合、最後に接続した機器が優先されます。

※複数の機器を接続した状態でeasyTek boostの電源を入れた場合は下記の順番で選択されます。

1. 電話着信
2. Bluetooth機器
3. FM受信機
4. 3.5mmステレオソケット
5. ボイスリンク

## ■専用プログラムの設定

easyTek boostは補聴器や携帯電話とペアリングして、すぐご利用いただけます。

更にテレビや音楽、電話の音声を専用のプログラムで聞くことも可能です。

お買い求めの販売店にご相談ください。




## ■リセット

電池残量が十分にあるにもかかわらず、ボタン押しても反応がない、動作がおかしいといった場合、easyTek boostをリセットしてください。

### ●操作方法



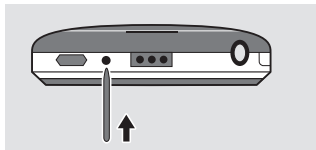

つまようじなどの細い棒でリセットボタンを1度押してください。  
easyTek boostがリセットされます。



**i** リセットしても補聴器やボイスリンク、携帯電話のペアリング情報は消えずに残ります。

## ■ペアリングの解除

ボイスリンクを除くすべての機器(補聴器を含む)のペアリングを解除できます。

- ①ファンクションボタン  とボリュームダウンボタン  を青・橙色のLEDが交互に点滅  するまで長押し(約10秒間)してください。
- ②ボイスリンクを除くすべての機器のペアリングが解除されます。
- ③青・緑色のLEDが交互に点滅  します。

 を短く1回押して緑LEDだけ点滅させます。

補聴器を再度ペアリングするためには、補聴器の電源を切/入ります。携帯電話のペアリングをするときは該当する機器のペアリング方法のページを確認してください。

**i** ボイスリンクのペアリングを解除するには、easyTekアプリを使用してください。

## easyTekアプリ

“easyTek App”を使用するとiPhoneやタブレット、アンドロイドスマートフォンから補聴器を操作することができます。

テレビを見たり、曲を聴いたり、携帯電話で友人に話していても指先ひとつで操作できます。

### ● アプリケーションを利用するための準備

- ① easyTek boostを装着して、電源を入れてください。
- ② スマートフォン/タブレットをBluetoothの操作範囲に置いてください。  
(約10m)

### ● ダウンロードのための準備

- ① スマートフォン/タブレットをインターネットに接続してください。
- ② Google Play\* Store (アンドロイドスマートフォン/タブレット) または App Store\*\* (iPhone/iPad) でアカウント設定をしてください。

\* Android and Google PlayはGoogle社の商標です。

\*\* iPhone/iPadは、米国および他の国々で登録されたApple社の商標です。またApp Storeは、Apple社のサービスマークです。

## ● ダウンロードとインストール

- ① Google Play Store か App Store で“easyTek”を検索してください。そしてスマートフォン/タブレットにアプリケーションをインストールしてください。
- ② インストールされたアプリケーションは“easyTek”の名前でスマートフォン/タブレットにリストされます。

他の方法として、QRコードリーダーがインストールされているならば、下記のQRコードをスキャンして、“easyTek”のリンクに直接進むことができます。

リンク先の指示に従って、ダウンロード及びインストールをしてください。



## 故障かな? と思ったら

### 症 状

easyTek boostで補聴器を操作できない

### 対処方法

- ① ネックループが正しく接続されているか確認してください。
- ② easyTek boostの電源が入っているか確認してください。
- ③ easyTek boostの充電状態を確認してください。
- ④ 電磁波ノイズを発生する電気製品(テレビ、パソコンのモニターなど)から離れてください。
- ⑤ 補聴器とのペアリングをやり直してください。
- ⑥ easyTek boostをリセットしてください。

### 症 状

補聴器とのペアリングができない

### 対処方法

- ① easyTek boostの電源が入っているか確認してください。
- ② easyTek boostの充電状態を確認してください。
- ③ 全ての機器とのペアリングを解除して補聴器とのペアリングをやり直してください。

## 症 状

オーディオストリーム(音声信号)が途切れる

## 対処方法

- ① ネックループがねじれていないか確認してください。
- ② easyTek boostの充電状態を確認してください。
- ③ ボイスリンク、携帯電話との距離を確認してください。
- ④ 金属製ネックレスや磁気ネックレスがオーディオストリーミングを妨害する場合がございます。ネックレスを外してご使用ください。








## 症 状










オーディオストリーム(音声信号)が聞こえない

## 対処方法





- ① ケーブル接続:
  - 外部機器との接続が正しくされているか確認してください。
  - オーディオケーブルが断線していないか確認してください。
- ② ワイヤレス接続
  - ボイスリンク、携帯電話とのペアリングを確認してください。
  - ボイスリンク、携帯電話との距離を確認してください。
- ③ 複数の機器が接続されている場合、優先される順番がございます。使用していない機器の接続を外すか、ワイヤレス機器の場合はオーディオストリームを停止してください。







## 操作ボタン早見表
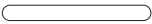
<p> または </p>	<ul style="list-style-type: none"><li>・音量調整 押すと音量が段階的に変化します。 押し続けると音量が連続的に変化します。</li></ul>
<p> と  を同時に短押し (約1秒)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>・外部機器の再生中又は電話通話中に ① ②が切り替わります。 ①外部機器の再生音/電話音声+補聴器音声 ②外部機器の再生音/電話音声のみ</li></ul>
<p> と  を同時に長押し (約2秒)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>・補聴器のスリープモードを開始/解除します。</li></ul>
<p> 短押し (約1秒)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>・プログラムの切替え</li><li>・オーディオ再生中は再生の停止</li><li>・補聴器がスリープモード中はスリープモードの解除</li><li>・電話着信時は電話の受け取り</li><li>・電話中は電話終了</li><li>・Bluetooth機器とのペアリング中はペアリングの中止</li></ul>



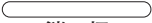


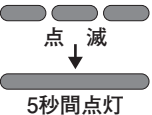

 長押し (約2秒)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• easyTek boostの電源オン/オフ</li> <li>• 電話着信中は着信拒否</li> </ul>
 短く二度押し	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ボイスリンクとの接続 開始/解除</li> <li>• 通話中は、通話をeasyTek boostから携帯電話へ、もしくは携帯電話からeasyTek boostに切替えます。</li> </ul>
 と  を同時に長押し (約5秒)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 携帯電話とのペアリング</li> </ul>
 と   を同時に長押し (約5秒)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ボイスリンクとのペアリング</li> </ul>
 と  を同時に長押し (約10秒)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ボイスリンクを以外のペアリング解除</li> </ul>




# LED点灯表示早見表

橙色LED	easyTek boostの状況
 消 灯	・ 充電完了
 点 灯	・ 充電中
 点滅(5秒間隔)	・ ボタンを押したとき ⇒ 充電電池の電圧が低い ・ 電源を入れたとき ⇒ 電源を入れられないくらい電圧が低い
 点滅(1秒間隔)	・ エラー発生 例：補聴器が検索圏内 ネックループが外れている

青色LED	easyTek boostの状況
 消 灯	・ 外部音響機器、携帯電話と接続されていない
 点 灯	・ 外部音響機器と接続中 ・ 携帯電話で通話中
 素早く点滅	・ 電話着信
 点 滅	・ Bluetooth機器と接続中 ・ ボイスリンクと接続中
 点 滅 ↓  5秒間点灯	・ Bluetooth機器と接続完了



緑色LED	easyTek boostの状況
 消灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>easyTek boostの電源が入っていない、または充電をしていない</li> <li>どのボタンも操作していない</li> </ul>
 点灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>充電中 ⇒ 充電完了</li> <li>音量を調節中 ⇒ ボリュームボタンの長押し</li> </ul>
 点灯(1秒間)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボタンを操作</li> </ul>
 点灯(2秒間)	<ul style="list-style-type: none"> <li>補聴器のスリープモード(開始/解除)</li> <li>easyTek boostの電源を入れています</li> </ul>
 点滅	<ul style="list-style-type: none"> <li>補聴器を検索中</li> </ul>
 5秒間点灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>補聴器との接続完了</li> </ul>
 徐々に消灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>easyTek boostの電源を切っています</li> </ul>

複数のLED	easyTek boostの状況
 橙・青色LEDが交互に点滅	<ul style="list-style-type: none"> <li>補聴器、携帯電話とのペアリング解除</li> </ul>
 緑・青色LEDが交互に点滅	<ul style="list-style-type: none"> <li>ペアリング解除完了。</li> <li>補聴器、携帯電話との再ペアリング待ち状態。  を短く1回押して緑LEDだけ点滅にしてからペアリングしてください。</li> </ul>

## 保管と輸送について

長期間の保管や輸送をする際は下記の環境を保ってください。  
保管する際は、補聴器のクリーニングをして、よく乾燥させてから保管してください。

保管条件	温度：10～40℃ 湿度：10～80%RH
輸送条件	温度：-20～60℃ 湿度：5～90%RH

電池の保管・輸送条件は異なります。電池と一緒に長期間の保管・輸送をしないでください。

## アフターサービスについて

- **保証書(別に添付してあります。)**  
保証書には必ず「販売店名、お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、大切に保管してください。
- **保証期間中、修理依頼されるとき**  
恐れ入りますが、保証書を添えてお求めの販売店へお持ちください。保証書の記載内容に従って、修理いたします。保証書の提示がないときは有料修理になります。
- **保証期間経過後の修理について**  
お求めの販売店または弊社にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料で修理いたします。
- **部品の保有期間**  
補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。
- **その他のお問い合わせは……**  
アフターサービスなどについてご不明な点は、お求めの販売店までお問合せください。

製造販売業者：シバントス株式会社

住 所：〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間1623-14  
三機大和ビル 6F

TEL 0800-888-0303 FAX 0800-888-4133

※フリーコールにつながらない場合は、下記番号まで  
お問合せください。

TEL 046-289-0303 FAX 046-407-1133

Sivantos GmbH

Henri-Dunant-Strasse 100 91058 Erlangen Germany

Manufactured by Sivantos GmbH under Trademark License of Siemens AG

キ-0003670A