


Styletto スタートガイド

この度はお買い上げいただきましてありがとうございます。このガイドには操作方法、使用上の注意などが記載されています。ご使用前に必ずお読みになり、正しくお取扱ください。

ユーザー様・販売店様

●Styletto 構造について

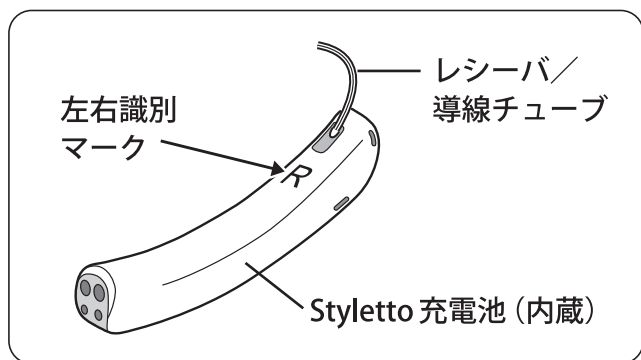

- R= 右耳用、L=左耳用 です。
- レシーバ/導線チューブは Styletto 本体に固定されており、取外せません。
- Styletto 充電池は既に内蔵されており、電池を入れる必要はありません。

●充電ケース ふたの開閉法

① ふたの両サイド(★部分)を指で押さえます。



② ふたが楽に開けられます。



●Stylettoと充電ケースをオン/オフにする方法

Styletto および充電ケースはいずれもリチウムイオン充電池を内蔵しており、個別に電源をオン/オフすることができます。目的に応じて下記の方法でオン/オフをおこなってください。

	Styletto		充電ケース	
	①オンにする	②オフにする	③オンにする	④オフにする
目的	<ul style="list-style-type: none"> • Stylettoをお使いになる時。 • 調整器につなぐ時。 • スマホアプリとペアリングする時。 	<ul style="list-style-type: none"> • Stylettoを乾燥ケース・乾燥機などに収納したい。(Stylettoがオン状態のままだとピーピーするハウリングを生じるため) 	<ul style="list-style-type: none"> • Stylettoをオン/オフしたい。 • Stylettoを充電したい。 	Stylettoと充電ケースを長期間保管したい。 ※詳しくはStyletto取扱説明書をご覧ください。
方法	オン状態の充電ケースに入ったStylettoを取出します(自動でオン)。	<ul style="list-style-type: none"> • オン状態の充電ケースにStylettoを収納します(自動でオフ)。 • このまま充電ケースをオフにすれば、Stylettoはオフ状態のまま充電ケースから取出せません。 • またはリモコン/アプリを使えば、充電ケースを使わずにStylettoをミュート状態にできます(ごくわずかなだけ電流を消費する、スリープ状態)。 	<ul style="list-style-type: none"> • 充電ケースのボタンを5秒間長押しします。 • または充電ケースにUSBケーブルを接続します(自動でオン)。 	充電ケースからUSBケーブルを取外し、充電ケースのボタンを5秒間長押しします。

(裏面に続きます)

ユーザー様

●Stylettoのお手入れ方法

Stylettoの性能を長く維持するためにも日頃のお手入れは大切です。耳垢で汚れやすいレシーバは毎日掃除してください。詳しい方法は取扱説明書をご覧ください。



- 耳せん(クリックスリーブ/ドーム)に耳垢が詰まると音が弱くなったり、聞こえなくなることがあります。そのような場合には、修理のご依頼前にもう一度耳垢が詰まっていないか？を確認してください。
- 汗を多くかけられる方や湿った耳垢の方は、別売の電気乾燥機“パーフェクトドライラックス”をお使いになることをお勧めします。
- 乾燥ケース(Stylettoに付属)/乾燥機(別売アクセサリ)をお使いになる場合には、オモテ面の表の「Styletto: ②オフにする」で、Stylettoの電源をオフにしてから収納してください。



◎乾燥&UV除菌

パーフェクトドライラックス 《高性能ベストセラーモデル》

- 30分で乾燥、99%UV除菌
- 乾燥剤不要で低ランニングコスト
- 急速ファン乾燥(30分)
- 45°を超えない優しい乾燥

販売店様

●Styletto フィッティング(調整)時のご注意

⚠ 初回フィッティング前には最低15分間の充電を。

初調整前に15分間の充電を促すための「15min」シール。シールを貼ったまま充電できます。

- Styletto および充電ケースは出荷前に30%程度の仮充電をしております。
- ➡ただし、念のために初回フィッティング前にはこのまま、最低15分間の充電をおこなってください。これで2~3時間分の充電ができます。充電残量が少なくなっていることによる突然の調整終了を防止するためです。(約5時間充電すればStylettoおよび充電ケースは満充電になります。)
- ➡シールをはがし、Stylettoを取出せば自動でStylettoの電源はオンになり調整を開始できます。



⚠ フィッティング時には毎回、充電ケースも必要です。



販売店調整機器 ConnexxAir

- 調整はConnexxAir専用です。
- Stylettoを検出するためには、いったんStylettoの電源をオフ⇒オンします。(オモテ面①参照)
- ➡オフ/オンするためには充電ケースを使います。
- StylettoがオンしたらConnexxAirで読み取り、調整を始めます。

「シバントス株式会社 カスタマーサービス部」